



DESCRIPTIF PRODUIT

Masque textile lavable et réutilisable


100% coton double tissage

2 épaisseurs

120Gr/M²

Lavage de 60° à 90°

Coloris Blanc

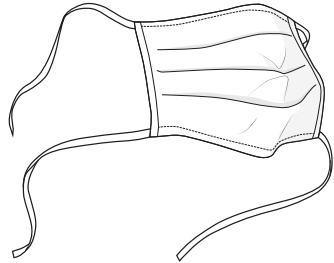

ENTRETIEN



> Lavage en machine de 60° à 90°

> Ne pas chlorer

> Séchage en tambour à température basse

> Repassage possible à température basse

> Nettoyage à sec autorisé

CONSEILS D'UTILISATION

Ces masques sont une première barrière, si ils sont combinés à l'ensemble des gestes barrières.



Se laver
très régulièrement
les mains



Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans son mouchoir



Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter



Saluer sans serrer
la main, éviter
les embrassades

Ce type de masque lavable est destiné à éviter, lors de l'expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie « gouttelettes » ou « aérienne ».

Pour votre sécurité et celle des autres, veillez à appliquer scrupuleusement les notices d'utilisation de ce masque :

- **Avant la première utilisation**, effectuer un premier lavage.

- Avant de toucher les masques propres se laver les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes et bien les sécher avec une serviette propre ou à l'air libre

- Mettre le masque **en couvrant le nez, le menton et la bouche. Il doit être appliqué hermétiquement sur le visage.**

- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains.

- **Après usage**, mettre les masques souillés dans une boîte hermétique ou sachet et fermer jusqu'au lavage.

- Se laver les mains au savon ou/et avec du gel hydroalcoolique après retrait.

- Laver en machine de 60° à 90 degrés avec du détergent classique.

- Faire bien sécher les masques à l'air libre ou au sèche-linge.

- Les stocker hermétiquement.